




PRESSALIT®

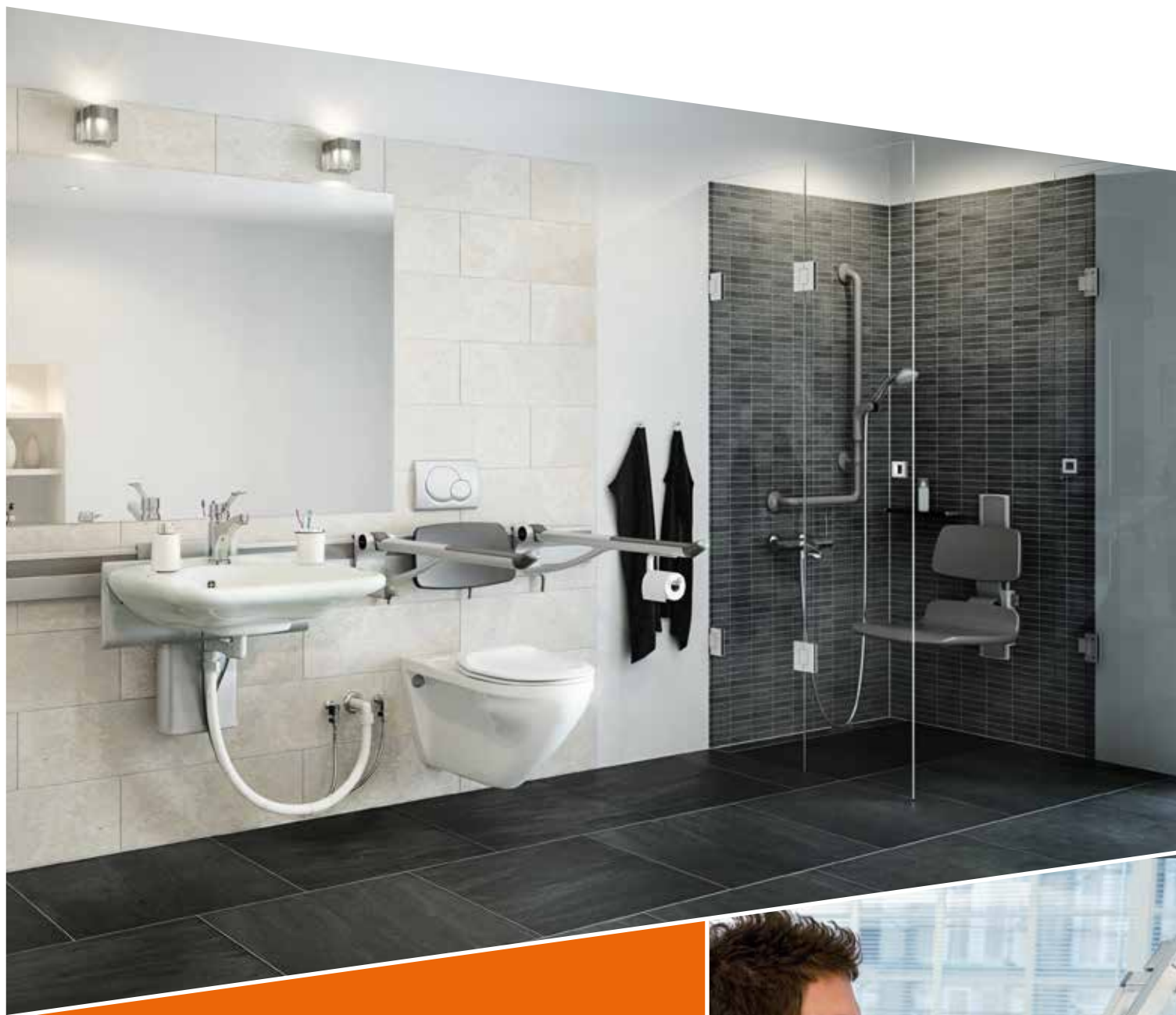

Inredningsguide Badrum



Det rätta valet

Pressalit är ledande inom badrumslösningar för människor med funktionsnedsättning. Vi är kända för vår kunskap och för den kvalitet och flexibilitet som är inbyggda i våra produkter.

Utöver ett stort sortiment av genomtänkta lösningar, erbjuder vi inredningsrådgivning, som baseras på kunskap om sjukdomsförlopp och utrymmeskrav.

Pressalits produkter skapas genom samarbete med både brukare och vårdgivare. Dessutom har vi samlad kunskap om rörelsemönster, inredningsbehov och utrymmeskrav. Mot denna bakgrund skapas de bästa och mest framtidssäkrade lösningar.

Vår strävan är ett bättre liv för människor med funktionsnedsättning, en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen och en bättre och mer långsiktig lösning för ledningen som ska investera.

Innehåll

Det välfungerande badrummet	Sida	4
Checklistor	Sida	6
Utrymmesbehov	Sida	8
Svängytor	Sida	9
Vid tvättställ	Sida	10
Vid toaletten	Sida	12
I duschutrymmet	Sida	14
En brukare	Sida	16
Skiftande brukare.....	Sida	18
Privatbostad	Sida	20
Regelbunden användning.....	Sida	22
Inredningar	Sida	24
Det flexibla badrummet.....	Sida	26



Det välfungerande badrummet



Brukare

Vi vill tillvarata brukarens rörlighet i bästa och möjligaste mån. Den genomtänkta och flexibla inredningen möjliggör för brukaren att i högre grad kunna klara sig själv i badrummet.

Självständighet

Pressalit system med skenor bidrar till att öka brukarens självständighet. Produkterna kan ställas in och placeras individuellt för den enskilda brukaren – vare sig det är barn, vuxna, gående eller sittande.

Detaljer

Systemets genomtänkta utformning, val av material och sinne för detaljer gör det lätt att integrera det i badrummet – utan att kompromissa med funktionalitet, komfort och design.

Självkänsla

Att klara sig själv i en trygg och elegant miljö ger behållning i vardagen.



Vårdgivare

Den brukare som inte klarar sig själv kommer att behöva hjälp. Härmed blir badrummet även en arbetsplats för både anhöriga och vårdgivare. Därför bör goda arbetsförhållanden högprioriteras så att arbetet kan utföras på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till hälsa och säkerhet.

Arbetsmiljö

Pressalits produkter innebär minimal fysisk belastning, snabbare och enklare arbetsförlopp och därmed goda arbetsförhållanden.

Flexibilitet

Produkterna kan snabbt och lätt ställas in och flyttas efter brukarens och vårdgivarens behov.

Respekt

Systemets flexibilitet säkerställer att vårdgivaren kan utföra sitt arbete utan att brukaren behöver ge avkall på integritet och värdighet.

Flexibilitet

Vi säger att badrummet ska anpassas till brukaren och inte tvärtom. Hur är det möjligt i praktiken: Att skapa ett rum som tillgodoser brukare med olika behov, personalens rätt till en bra arbetsplats och ledningens krav på ekonomi?

Det är det när man tänker in flexibilitet i inredningen. Med hjälp av Pressalits system av vågräta och lodräta skenor, kan badrummet på ett enkelt och logiskt sätt inredas för den enskilda brukarens fysiska behov.

Skenan gör det lättare för brukaren att klar sig själv och för vårdgivaren att hjälpa till. Lättare att göra rummet klart, lättare att skapa utrymme, lättare att hjälpa till vid förflyttningar och lättare att kombinera användningen av badrummets funktioner.

För att förstå de enskilda behoven, vid tvättstället, vid toaletten och i duschområdet i badrum för funktionsnedsatta, ställer Pressalit sin kunskap till förfogande. På så sätt kan vi tillsammans hitta fram till den mest optimala lösningen i det enskilda fallet.



Rum

Badrum är ofta antingen för små eller för dåligt disponerade. Eftersom inte väggarna flyttar sig får våra produkter göra det. Flexibiliteten i våra lösningar gör rummet mer tillgängligt och arbetsanpassat så att utrymmet utnyttjas optimalt.

Rådgivning

Fullständig rådgivning om det välfungerande badrummet säkerställer att rummet är anpassat för brukare och vårdgivare samt att arbetsmiljöregler efterlevs.

Framtidssäkring

Pressalits system gör ombyggnation och renovering överflödigt vid ändrade brukarbehov. Produkterna kan sättas på och tas av skenorna, helt utan användning av verktyg.

Design

Filosofin bakom produkterna är att flexibilitet, funktionalitet och god ekonomi ska åstadkommas utan att behöva kompromissa med design och inredning.



Checklistor



Planläggning av projektet

Nyckeln till ett välfungerande badrum är en systematisk värdering av rummets möjligheter samt brukarens och vårdgivarens behov. Det kräver en genomgång av utrymmeskrav, svängmått och enskilda funktioner vid tvättstället, toaletten och duschen.

De olika förhållanden som ska tas hänsyn till i planeringsfasen, kan verka omfattande och oöverskådliga. Uppgiften blir lättare att ta sig an med rätt systematik.

Den första skillnaden går mellan en eller flera brukare. Vid en brukare ska inredningen anpassas så att både nuvarande och framtida fysiska förmåga tillgodoses. Vid flera brukare är kravet på flexibilitet ännu större. Det är avgörande att inredningen gör att många dagliga byten går snabbt och lätt.

Checklistorna ger en rad av de mest avgörande frågor som ska klaras av i planeringen av det välfungerande badrummet.



Brukare

- ☐ Är brukaren barn eller vuxen, smal eller kraftig, självständig eller beroende av hjälp?
- ☐ Är brukaren gående, sittande eller liggande?
- ☐ Använder brukaren käpp, rullstol eller större förflyttningshjälpmedel?
- ☐ Beror brukarens funktionsnedsättning på olycka, ålder eller sjukdom?
- ☐ Är situationen stabil eller är det en sjukdom med ett fortskridande förlopp?
- ☐ Hurdana är brukarens dagliga färdigheter vid tvättställ, toalett och dusch?
- ☐ Har brukaren genomgått rehabilitering?
- ☐ Är brukaren höger- eller vänsterhänt?
- ☐ Kan produkternas flexibilitet öka brukarens självständighet?

Vårdgivare

- ☐ Behövs en eller flera vårdgivare?
- ☐ Har man tagit hänsyn till att en brukare med vårdgivare kräver extra utrymme?
- ☐ Finns lagar eller regler kring utrymmes- och arbetsvillkor som ska följas?
- ☐ Vilka förflyttningshjälpmedel och förflyttningsmetoder används?
- ☐ Hurdana är rörelsemönstret och arbetssituationen vid handtvätt, toalett och dusch?
- ☐ Är vårdgivaren höger- eller vänsterhänt?
- ☐ Kan produkternas flexibilitet förbättra vårdgivarens arbetsförhållanden?



Rum

- ☐ Ska rummet användas av en eller flera olika brukare?
- ☐ Är byggnaden en privatbostad, institution, sjukhus, hotell eller semesterbostad?
- ☐ Ska det finnas plats för förflyttningshjälpmedel som rullstol, mobil personlyft, taklift etc.?
- ☐ Sker förflyttningar i rummet eller är brukaren självständig?
- ☐ Uppfyller rummet gällande lagkrav och normer för inredning av badrum för rörelsehindrade?
- ☐ Finns arkitektoniska och byggnadstekniska begränsningar som storlek och form, installationer, rör, pelare, dörrplaceringar o dyl.?
- ☐ Hurdant är förhållandet mellan badrum och sovrum och eventuella andra rum?
- ☐ Är det välfungerande badrummet inrättat med hänsyn till brukarens och vårdgivarens värdighet och integritet?




Utrymmesbehov


Badrum för människor med funktionsnedsättning ska vara större än vanliga badrum. Det ska finnas utrymme för både självständiga brukare och förflyttningshjälpmedel samt brukare som är beroende av hjälp med 1-2 vårdgivare. Nedan anges mått på brukare, vårdgivare och de vanligaste förflyttningshjälpmedlen.




Brukare

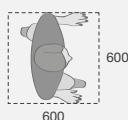


Brukare under förflyttning

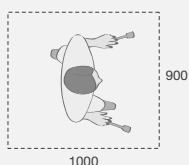


Brukare med käpp

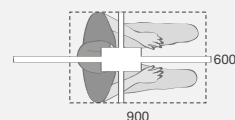


Brukare i taklift

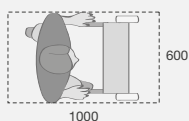

Brukare med rollator

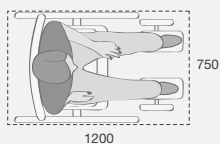


Brukare i manuell rullstol

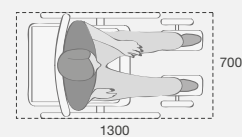


Brukare i elrullstol




Vårdgivare

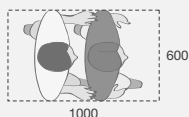


Brukare och vårdgivare
- under förflyttning

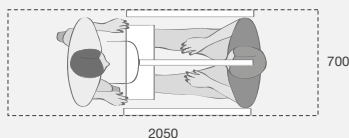


Brukare och vårdgivare
- mobil personlift

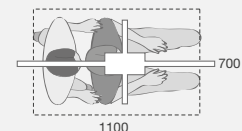


Brukare och vårdgivare
- i taklift

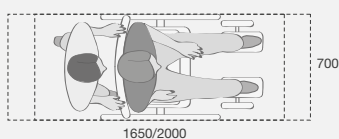

Brukare och vårdgivare
- mobil toalett- eller duschstol,
normalt och tippat läge

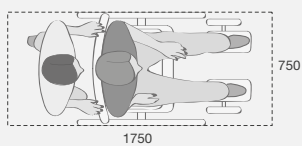

Brukare och vårdgivare
- i manuell rullstol

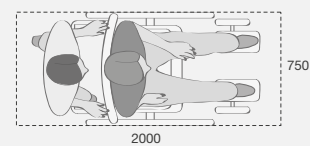

Brukare och vårdgivare
- i komfortrullstol

Svängytor

Badrummet för människor med funktionsnedsättning ska ha en svängyta – en yta, som möjliggör förflyttning. Ytan är vital eftersom det är här som brukaren ska kunna vända och placera sig i förhållande till badrummets olika funktioner.




Rum

Gående brukare

Brukare som använder käpp, kryckor eller rollator.

Svängyta utan vårdgivare: 1 400 x 1 400 mm


Svängyta med vårdgivare: 1 700 x 1 700 mm

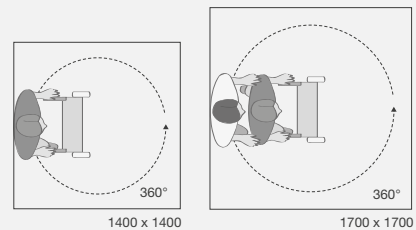

Brukare i manuell rullstol

Svängyta utan vårdgivare: 1 700 x 1 700 mm


Svängyta med vårdgivare: 1 750 x 1 750 mm

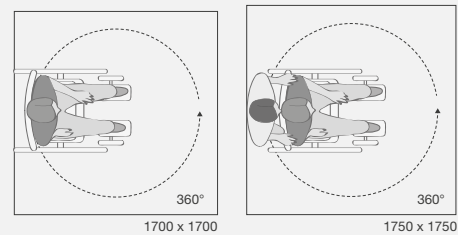

Brukare i elrullstol och komfortrullstol

Svängyta utan vårdgivare: 2 100 x 2 100 mm

Svängyta med vårdgivare: 2 100 x 2 100 mm

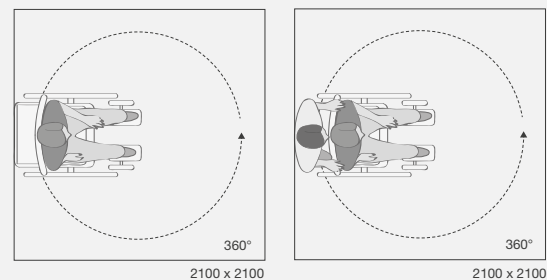





Tvättställ

- ☐ Bredden ska vara min. 600 mm och djupet min. 600 mm från framkant till vägg.
- ☐ Som minimum höjddjusterbart.
- ☐ Flatbotten, rakt eller inåtböjd framkant, tillbakadraget avloppshål och avrundade hörnen.
- ☐ Fri utrymme under tvättstället med utrymme för rullstolsanvändarens ben.
- ☐ Välj gärna ett tvättställ med integrerat stödgrepp.

Vid tvättställ



Självständig brukare

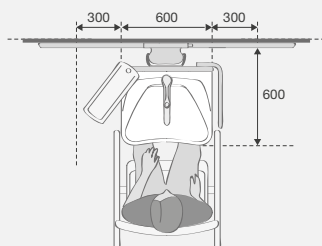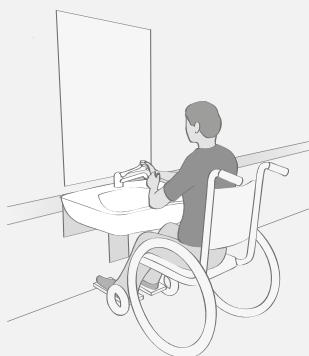

Utrymmeskrav



Min. 300 mm på varje sida av tvättstället.

Fri yta

1 500 x 1 500 mm svängyta framför tvättstället.



Brukare som är beroende av hjälp

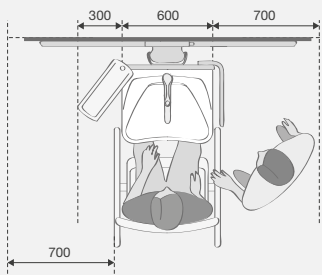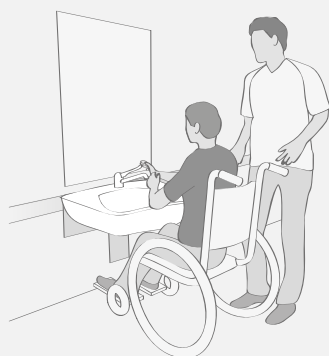

Utrymmeskrav

Min. 700 mm på vårdgivarsidan, gärna på båda sidor av tvättstället.



Fri yta

1 500 x 1 500 mm svängyta framför tvättstället.

Fri yta ger utrymme för att vårdgivaren ska kunna passera.



Utrymme runt tvättstället

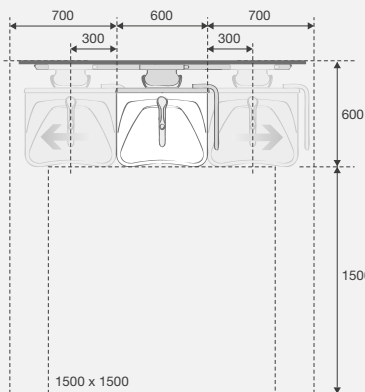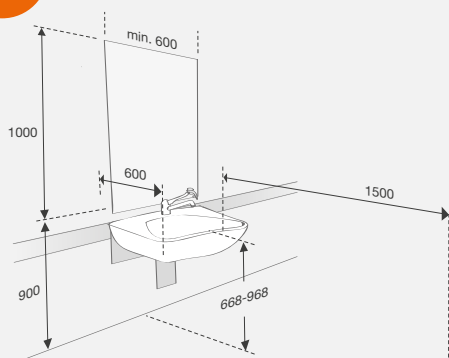

Ett tvättställ som kan justeras lodrätt och vågrätt, kan placeras individuellt i förhållande till brukarsituation och utrymmesbehov.

Tillbehör bör placeras inom brukarens och vårdgivarens räckvidd och eventuellt monteras på det reglerbara tvättstället.

Var uppmärksam på förhållanden som förstärkning av väggar, flexibelt till- och avlopp, elinstallationer mm.


Observera! Alla mått och inredningar baseras på högerhänta brukare. De kan spegelvändas för vänsterhänta brukare.

Armatur


- ☐ Ska kunna användas av stående och sittande brukare. Välj en modell med skållningsskydd och vattensparfunktion.
- ☐ Ringformat blandargrepp och lång vridbar utloppspip och med tydlig skillnad på reglering av vattenmängd och temperatur.
- ☐ Undvik lyftventil. Den försvårar användningen och tar stor plats.

Spegel


- ☐ Ska kunna användas av både barn och vuxna, både stående och sittande.
- ☐ Min. 1 000 x 600 mm (h x b). Bredare om tvättstället kan flyttas i sidled.
- ☐ Spegelbelysningen får inte blända och placeras bäst på var sida av spegeln.

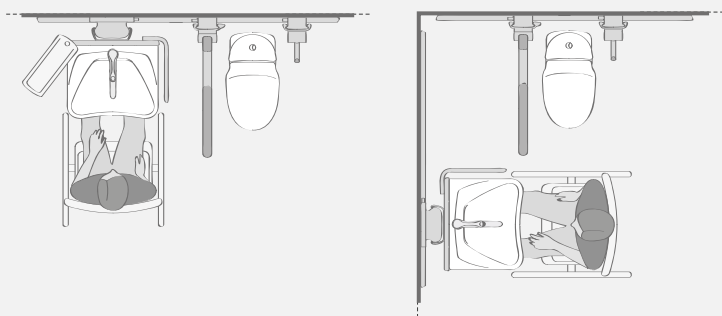

Tvättstället placeras så att det också kan utnyttjas av en brukare som sitter på toaletten. Många självständiga brukare föredrar att kunna nå rinnande vatten i samband med toalettbesök.

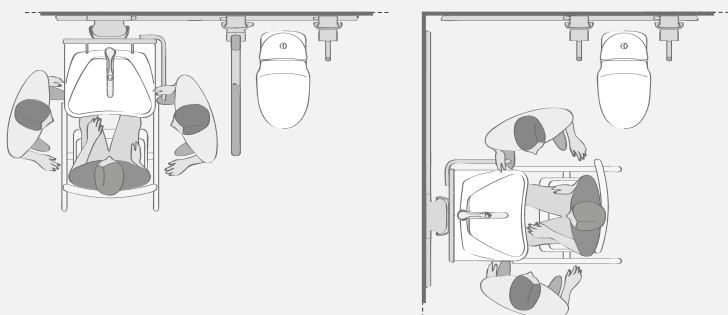

Tvättstället placeras för att ge utrymme för vårdgivaren på minst en av sidorna – helst på båda sidor.

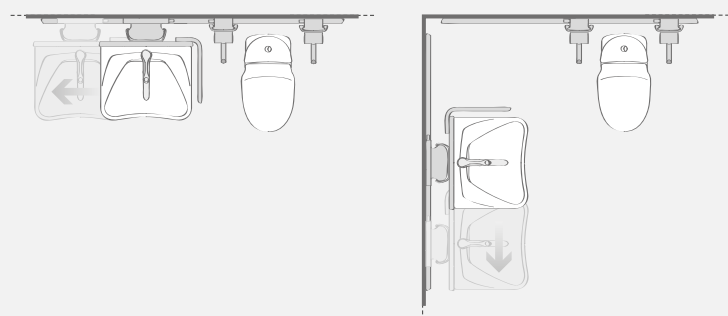

Produkter som är reglerbara i sidled ger stor inredningsfrihet. Tvättstället kan placeras så att både självständiga brukare och vårdgivarens behov tillgodoses. Tvättstället flyttas av vårdgivaren.

Observera att spegelbredden och till- och utloppsslangarna väljs utifrån tvättställets regleringsområde.





Toalett

- ☐ 700 - 800 mm från framkant till bakre vägg.
- ☐ På golvmodeller kan sitthöjden ändras med hjälp av toalettförhöjning.
- ☐ Vägghängda toaletter kan monteras i individuell höjd på väggen eller monteras på en upphängning för toalett.
- ☐ Vägghängda toaletter ger utrymme för t.ex. fotstöd på rullstol och underlättar rengöring.

Vid toaletten



Självständig brukare

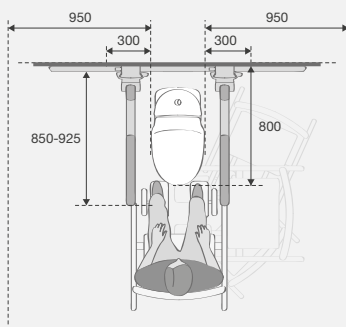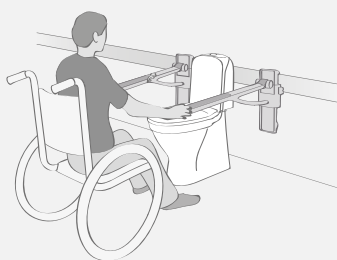

Utrymmeskrav

Det behövs min. 950 mm friyta på en av sidorna – på båda sidorna om förflyttning ska ske från både höger och vänster sida.



Friyta

1 500 x 1 500 mm framför toalettstolen. Härmed finns utrymme för alla typer av förflyttningar till och från toaletten.

Papper, avfalls- och förvaringskorg ska finnas inom brukarens räckvidd.



Brukare som är beroende av hjälp

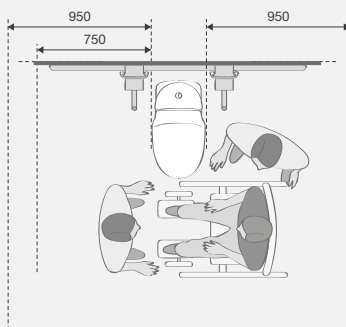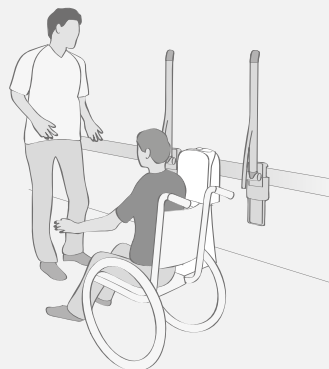

Utrymmeskrav

Min. 950 mm friyta på rullstolssidan och 750 mm på vårdgivarsidan. Om förflyttning sker på båda sidor ska båda avstånden vara min. 950 mm.

Friyta



1500 x 1500 mm framför toalettstolen. Härmed finns utrymme för alla typer av förflyttningar till och från toaletten.

Friyta ger utrymme för att vårdgivaren ska kunna passera.

Papper, avfalls- och förvaringskorg ska finnas inom brukarens och vårdgivarens räckvidd.



Utrymme runt toaletten

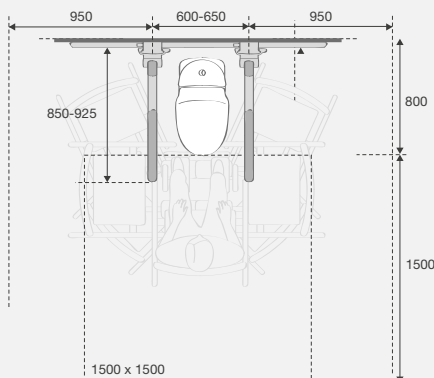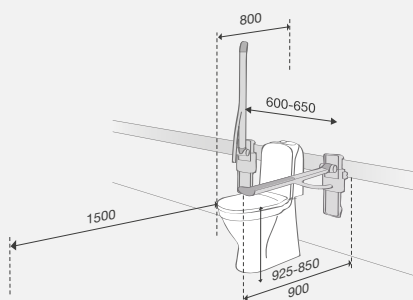

Toaletten är en av badrummets stationära produkter. Den ska därför vid disponeringen av rummet placeras med hänsyn till både brukare, vårdgivare och förflyttningshjälpmedel.

Toalettarmstöd som kan ställas in lodrätt och vågrätt tillgodoser brukarens individuella behov.

De kan med fördel installeras för att fungera tillsammans med andra produkter som tvättställ och handdusch.


Observera! Alla mått och inredningar baseras på högerhänta brukare. De kan spegelvändas för vänsterhänta brukare.

Toalettsits

- ☐ Toalettförhöjning kan kompensera för låg sitthöjd.
- ☐ Välj en sits som är anpassat för brukaren.
- ☐ I rum med förflyttningar bör man välja en sits med vridbuffrar och institutionsbeslag.

Toalettarmstöd

- ☐ Ska vara stabilt och kunna vikas upp.
- ☐ Ett höjjusterbart toalettarmstöd ökar säkerheten och komforten för brukaren.
- ☐ Toalettarmstöden ska vara så långa att den stående brukarens ben har fritt utrymme vid toaletten vid t.ex. förflyttning framåt.
- ☐ Oval form ger stabilt och ergonomiskt stöd. Stödets ände ska ge ett säkert grepp.

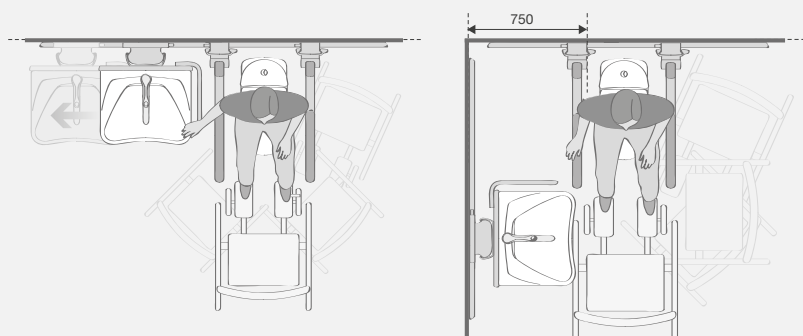


Tvättstället placeras så att brukaren kan nå rinnande vatten från toaletten, dvs. inom avståndet på 750 mm. Om avståndet är större har brukaren svårt att nå tvättstället.

Hörnmontering

Om rullstolen ska placeras mellan toalett och vägg, ska avståndet vara 950 mm och tvättstället ska flyttas.

Montering på samma vägg

Vid 45° förflyttning från vänster flyttas tvättstället.

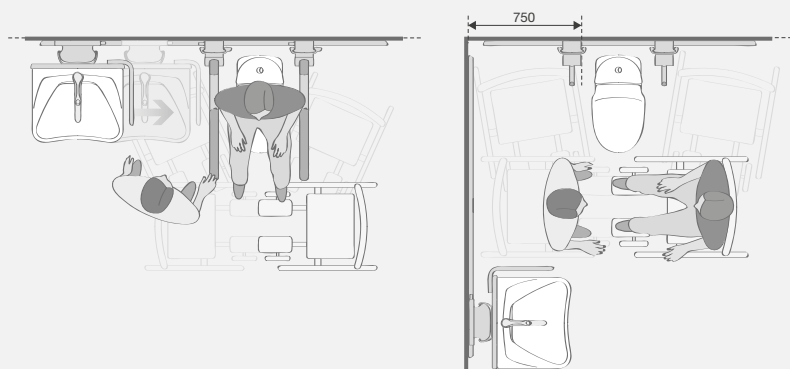


Tvättstället kan placeras så att det finns gott utrymme för vårdgivaren vid förflyttning. Tvättstället flyttas därefter tillbaka så att vårdgivaren och brukaren kan nå rinnande vatten.

Hörnmontering

Tvättstället placeras vid sidan av eller bakom vårdgivaren.

Montering på samma vägg

Tvättstället placeras framför vårdgivaren.

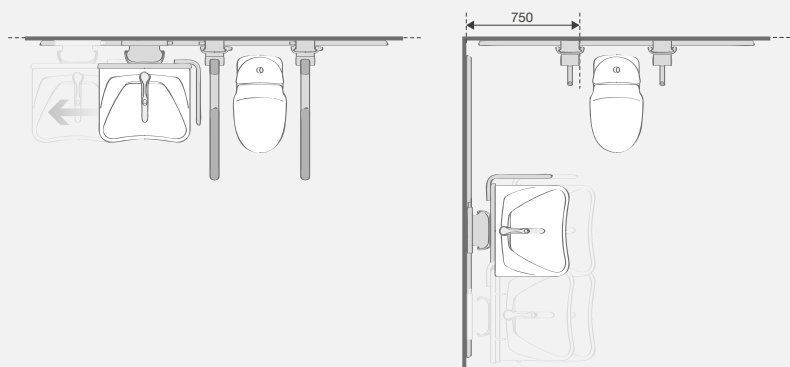

Produkter som är reglerbara i sidled ger stor inredningsfrihet. Avståndet mellan toalettarmstöd kan anpassas till stora och små personer och tvättstället kan placeras så att både självständiga brukares och vårdgivares behov tillgodoses. Tvättstället flyttas av vårdgivaren.





Duschsits

- ☐ Bör som minimum vara höjjusterbart.
- ☐ Bör kunna vikas upp för att ge utrymme för den stående brukaren.
- ☐ God sittkomfort.
- ☐ Halsäker yta.

I duschutrymmet



Självständig brukare

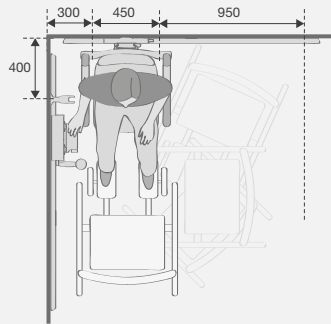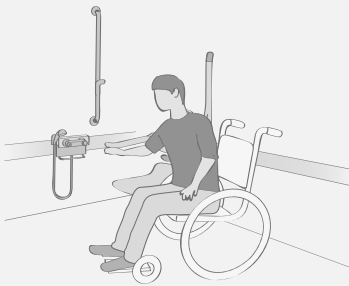

Utrymmeskrav

Min. 950 mm på rullstolssidan



Friyta:

1 500 x 1 500 mm svängyta framför duschsitsen.

Tillbehör placeras inom brukarens räckvidd.



Brukare som är beroende av hjälp

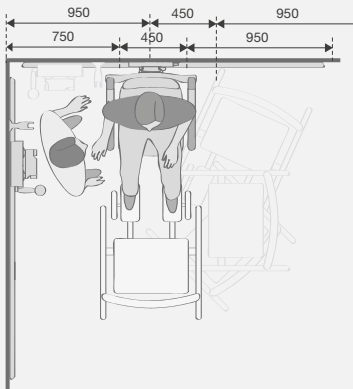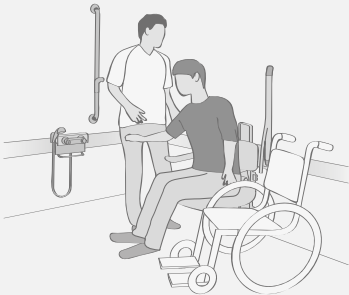

Utrymmeskrav

Min. 950 mm på rullstolssidan, 750 mm på vårdgivarsidan.



Friyta:

1 500 x 1 500 mm svängyta framför duschsitsen.

Friyta ger utrymme för att vårdgivaren ska kunna passera.



Utrymme i duschutrymmet

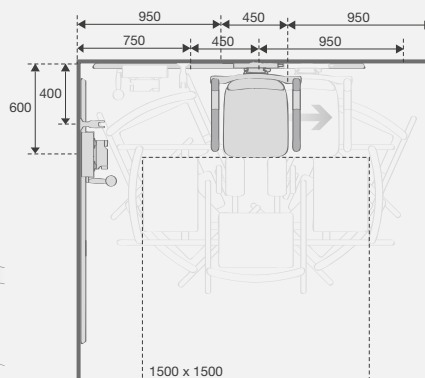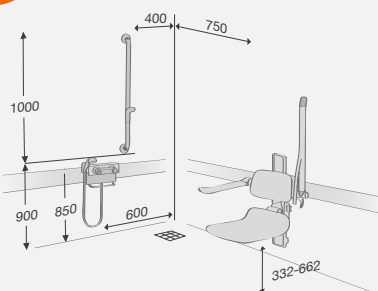

Flyttbar duschsits och armatur ger optimal flexibilitet.

En lång duschslang - 2 000 mm - ger stor rörelsefrihet.



Golvet ska vara halsäkert utan nivåskillnad och med en lutning på max. 2°

Armatyr och handdusch

- ☐ Armaturen ska kunna användas av både stående och sittande brukare. Eventuellt vid montering på armaturhållare.
- ☐ Termostatreglering förebygger skållning.
- ☐ Långa handtag och inga vassa kanter.
- ☐ Handduschen ska vara lätt med ett bra handgrepp.

Duschstång och duschhållare



- ☐ Duschstången ska vara stark och stabil så att den även kan användas som stödhandtag.
- ☐ Duschhållaren bör vara enkel att ställa in. Både i höjd och med hänsyn till vattenstrålens riktning.
- ☐ Stångens längd ska vara min. 1 000 mm med hänsyn till stående brukare.
- ☐ Duschslang av värmeisolerande konstmaterial.

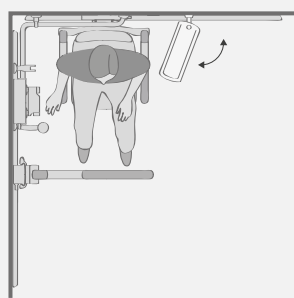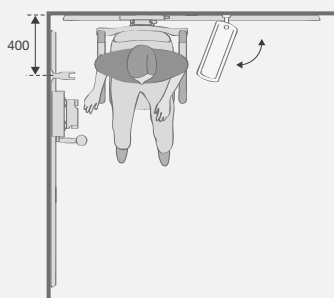

Hörnmontering

Brukaren ska kunna nå armatur, handdusch och duschstång från duschsitsen.

Ett toalettarmstöd placerat framför brukaren kan underlätta vid förflyttningar eller användas som stöd t.ex. vid intimhygien.

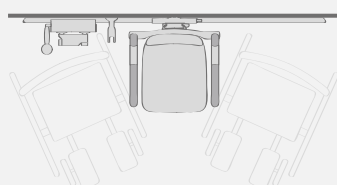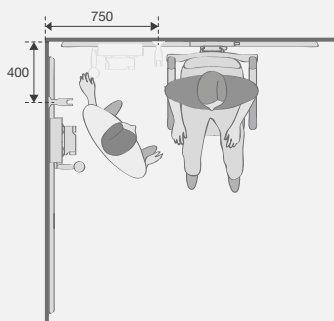



Hörnmontering

För utrymme för vårdgivare placeras duschsitsen min. 750 mm från hörnet till rullstol min. 950 mm. Den extra duschstången placeras 750 mm från hörnet.

Montering på samma vägg

I rum utan självständiga brukare ger denna montering gott utrymme för både förflyttningar och för vårdgivaren.

En "omvänd-T"-lösning med stödhandtag/ duschstång ger stöd för brukare som är beroende av hjälp med begränsad ståfunktion.

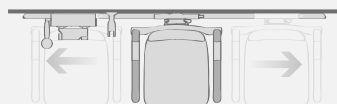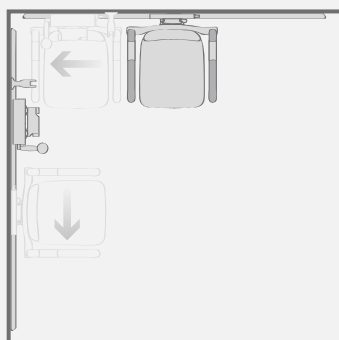

Produkter som är reglerbara i sidled ger stor inredningsfrihet. Duschsitsen och armaturhållare kan placeras så att brukarens behov av självständighet och vårdgivarens krav på utrymme tillgodoses. T.ex. kan duschsits och armaturhållare "spegelvändas" för vänsterhänta användare. Produkterna flyttas och ställs in av vårdgivaren.



En brukare

Den boende

Badrummet inreds för den enskilda brukaren och kan enkelt anpassas för nya behov - antingen för samma person eller i samband med en ny boende.

Det är inte nödvändigt att utrusta alla badrum komplett med samma produkter, då de vid behov kan avlägsnas utan användning av verktyg. På samma sätt kan nya produkter levereras som bara kan hängas på väggskenan.



- ☐ Vem är brukaren/brukarna?
- ☐ Vem flyttar produkterna?
- ☐ När ska de flyttas?
- ☐ Hur långt ska de flyttas?




Självständig brukare

Den självständiga brukaren på vårdhem eller i äldreboenden kan själv klara av de flesta dagliga göromål. Det är lätt att förflytta sig med rollatorn eller rullstolen och placera den i förhållande till aktiviteterna.

De flyttbara produkterna är inom räckvidd. Tvättstället är nära toaletten och brukaren kan nå armatur och duschen från duschsitsen i hörnet.

Duschstången kan användas som stödhandtag.

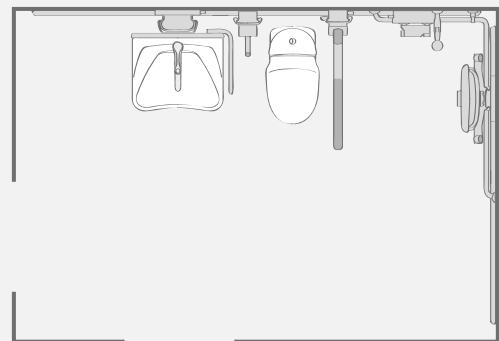


Brukare som är beroende av hjälp

Om den boende vid en tidpunkt blir beroende av en vårdgivare, ska badrummet ge stöd för nya och andra behov.

Den flexibla inredningen skapar goda arbetsförhållanden för vårdgivaren runt produkterna.

Tvättstället har som visas, flyttats bort från toaletten.


Duschsitsar och armaturhållare kan placeras fritt på båda väggarna i hörnet.

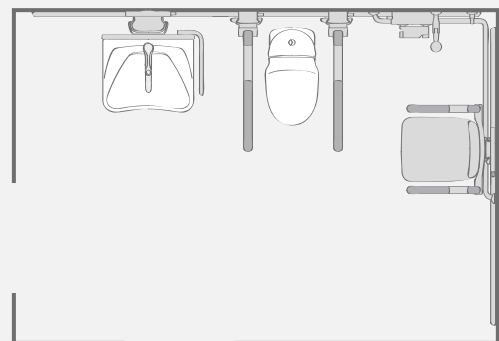

Rummet

Ska man kunna nå tvättstället från toaletten eller ska duschen kunna användas som bidéfunktion? Det är en fråga som ska övervägas i linje med övervägningarna om produkter och utrymmesbehov.

Med en flexibel inredning är det möjligt att tillgodose både den nuvarande och en framtida boendes behov.

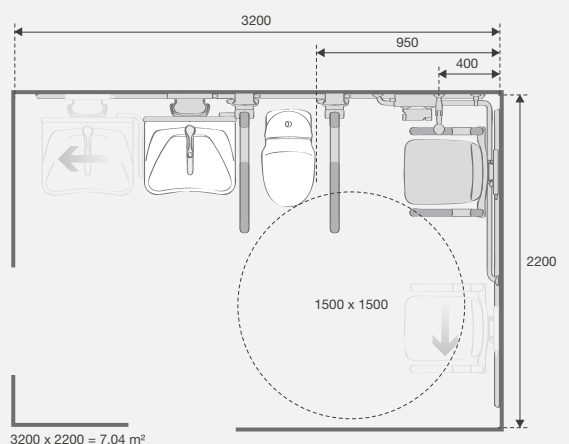



Skiftande brukare

Patienten

På t.ex. sjukhus kommer olika brukare in i badrummet under en dag. Med höj- och sänkbara produkter på vågräta skenor kan rummet anpassas till den enskilda brukarens behov. Patienterna blir härmed mer självständiga och personalen kan undvika många tunga arbetssituationer.




- ☐ Vem är brukaren/brukarna?
- ☐ Vem flyttar produkterna?
- ☐ När ska de flyttas?
- ☐ Hur långt ska de flyttas?



Självständig brukare

För den patient som kan klara sig själv men har behov av rullstol, är det viktigt att det finns utrymme för rullstolen - t.ex. vid förflyttningar.


Tvättstället är nära toaletten och brukaren kan använda armatur och dusch både från duschsitsen i hörnet och från toaletten (bidéfunktion). Toalettarmstödet kan placeras framför duschstolen som extra stöd.

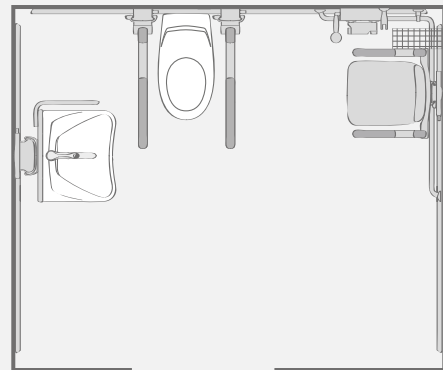

Brukare som är beroende av hjälp


För den patient som har behov av en vårdgivare för de flesta göromål, är det viktigt med gott utrymme runt produkterna. Det ger vårdgivaren goda arbetsförhållanden.

Här har tvättstället flyttats bort från toaletten och duschsitsen bort från hörnet. Det ger vårdgivaren god arbetsutrymme runt produkterna.

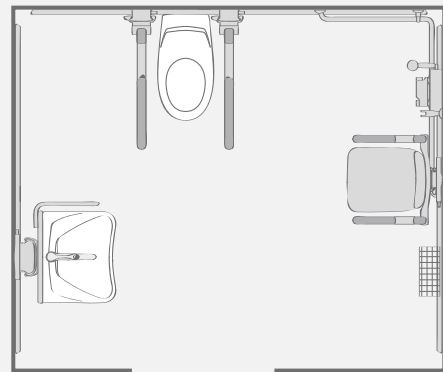

Rummet

Snabba, dagliga byten från en brukare till en annan är vanligt på t.ex. sjukhus. Därför ska det vara enkelt och intuitivt att ställa in produkterna för den nya situationen.

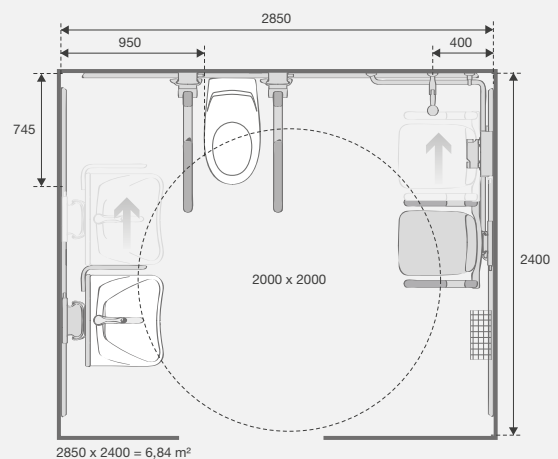



Privatbostad

Familjemedlemmen

Det privata badrummet ska vara ett ställe som fungerar för hela familjen, även om behoven skiljer sig åt. Rummet ska snabbt kunna ställas om för brukare med vitt skilda behov, så att hänsyn tas till både barn, vuxna och familjemedlemmar med funktionsnedsättning.




- ☐ Vem är brukaren/brukarna?
- ☐ Vem flyttar produkterna?
- ☐ När ska de flyttas?
- ☐ Hur långt ska de flyttas?



Självständig brukare

I en privatbostad där en familjemedlem har en funktionsnedsättning, kan man välja endast de produkter som lämpar sig till personens behov.


Den långa toaletten med toalettarmstöden ger goda möjligheter för förflyttning till och från rullstolen. Brukaren kan nå tvättstället från toaletten. Duscharmatur, duschstång med duschhållare och handdusch är placerade i duschhörnet inom räckvidd.

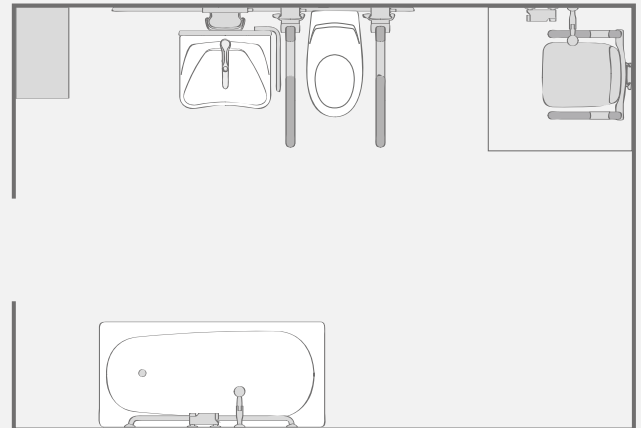

Familjen


För den stående delen av familjen kan duschsitsen vikas upp för att ge utrymme.

Tvättstället höjs eller sänks till lämplig höjd och om toalettarmstöden är i vägen, kan de vikas upp.

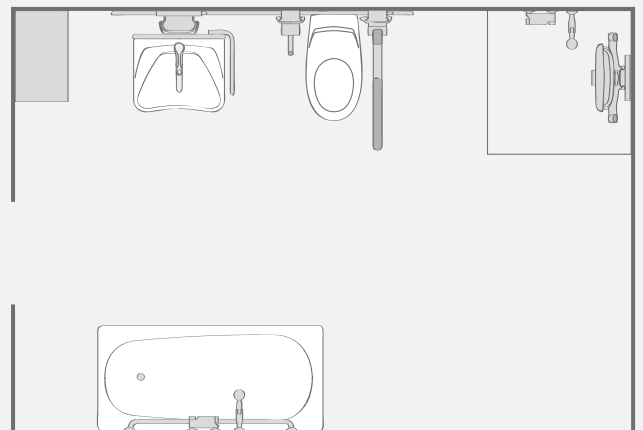

Rummet

Rummet är planerat med hänsyn till förflyttningshjälpmedel som rullstol och rollator. Det kan snabbt ställas om till den stående brukaren utan funktionsnedsättning - utan att kompromissa med design och estetik.

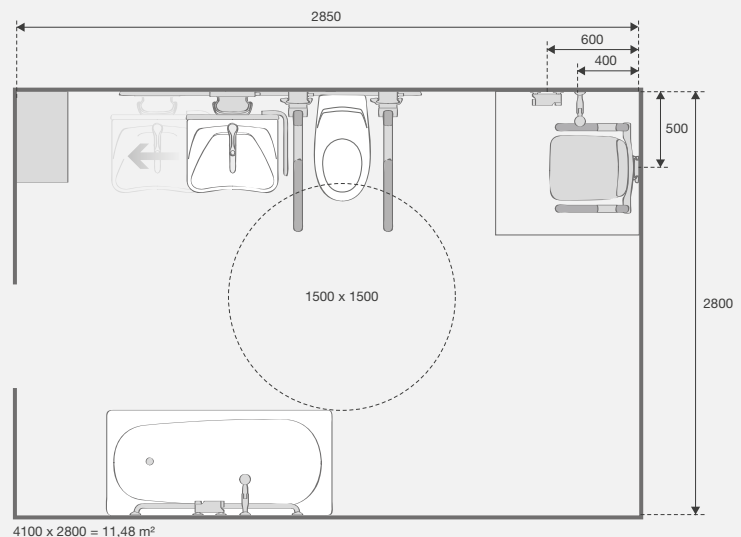



Regelbunden användning

Gästen

Ett hotellrum ska vara förberett för många olika besökare. Med de vågräta väggskenorna kan rummet periodvis anpassas för den aktuella gästen och det aktuella behovet. Skenorna möjliggör snabba byten och endast de nödvändiga produkterna monteras och ställs in.




- ☐ Vem är brukaren/brukarna?
- ☐ Vem flyttar produkterna?
- ☐ När ska de flyttas?
- ☐ Hur långt ska de flyttas?




Före

Om det inte behövs kan toalettarmstöd, duschsitsar och ryggstöd användas i ett annat av hotellets rum eller läggas i ett förråd.

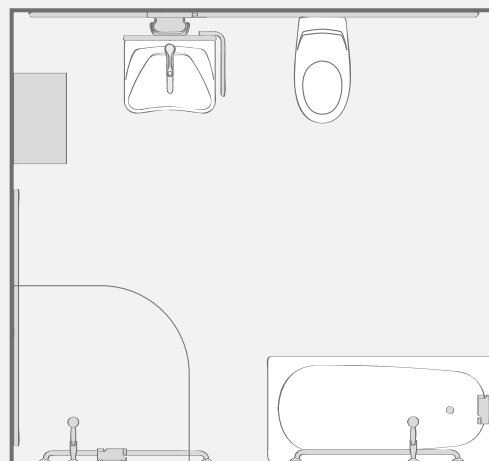

Efter


Badrummet kan snabbt inredas för en person med funktionsnedsättning. Relevanta produkter som toalettarmstöd och duschsitsar har monterats på de vågräta väggskenor.

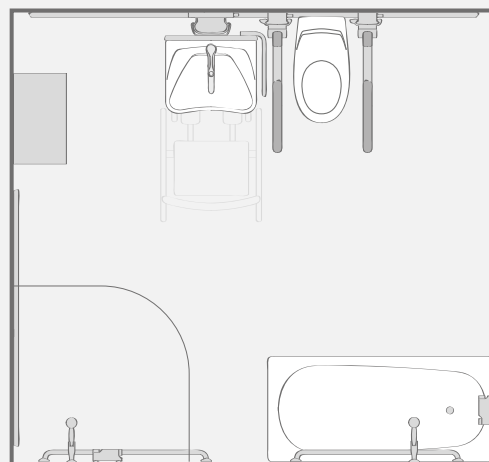

Rummet

Rummet ska vara fint och inbjudande för alla typer av gäster, utan att kompromissa med funktionalitet, för de brukare som behöver hjälpmedel.

Rummet ska möjliggöra snabb och enkel montering av nödvändiga produkter och det ska vara lätt och intuitivt för gästen eller för vårdgivaren att ställa in dem.

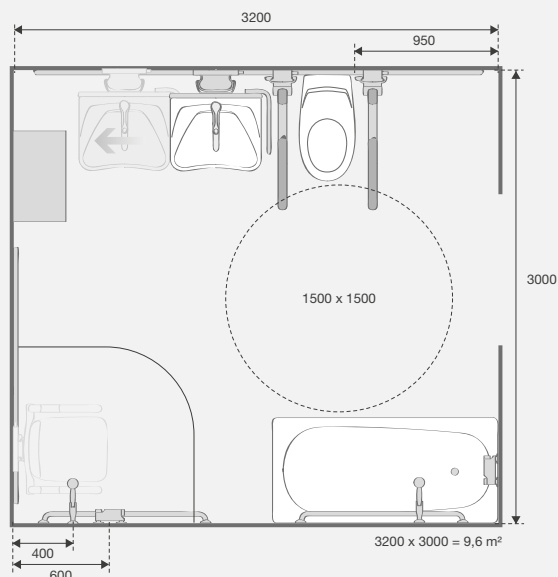




Ska toalett och tvättställ placeras på samma vägg eller i en hörnmontering? Det finns inget entydigt svar på det. Man kan generellt säga att hörnmonteringen är mycket lämplig när rummet ska användas som arbetsplats. Det är lätt att ge plats för både personal och förflyttningshjälpmedel på båda sidor om de tre stationerna: tvätt - toalett - dusch.

Lösningen med toalett och tvättställ på samma vägg och duschen i ett hörn ger goda möjligheter att klara sig själv. Med produkter som är flyttbara i sidled kan det också lätt ges utrymme för både vårdgivare och förflyttningshjälpmedel.



Inredningar

Inredningsprinciper

Placering av toalett, tvättställ och duschar i tre olika rumstyper.

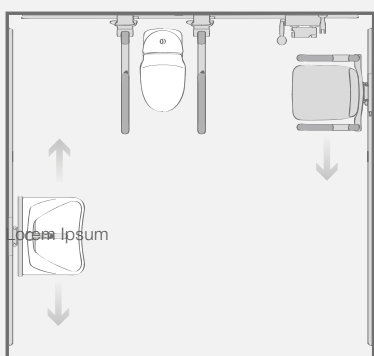


Inte måttfast

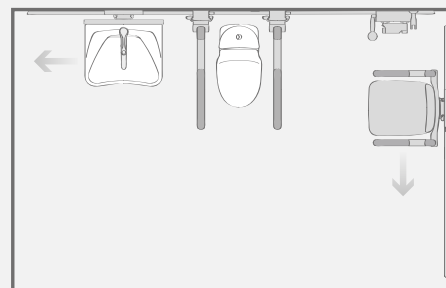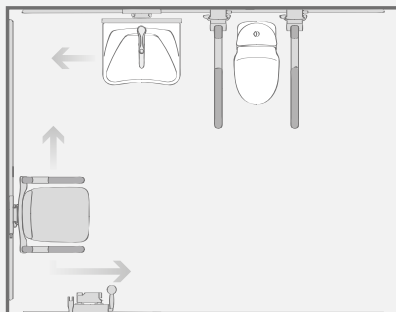


Små rum

I små rum t.ex. i det existerande byggnadsbeståndet kan flyttbara produkter ge utrymme för vårdgivare eller förflyttningshjälpmedel.

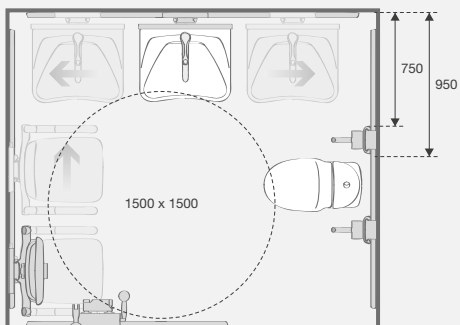

2100 x 2450 = 5,1 m²

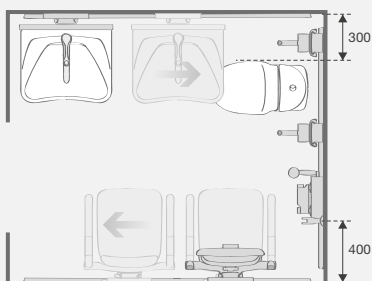


1800 x 2100 = 3,8 m²


Observera! Alla inredningar är ritade med utgångspunkt från högerhänta brukare och kan spegelvändas efter behov.

Badrummet ska planeras utifrån brukarens och vårdgivarens behov. Var uppmärksam på att flera länder har vedertagna standarder för inredning av handikappbadrum och -toaletter med hänsyn till att säkerställa de bästa villkoren för både brukare och vårdgivare.


Väl lämpade rum

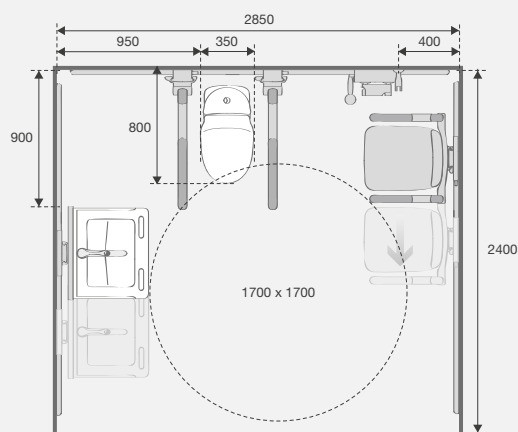


$2850 \times 2400 = 6,84 \text{ m}^2$
Arbetsplats i fokus

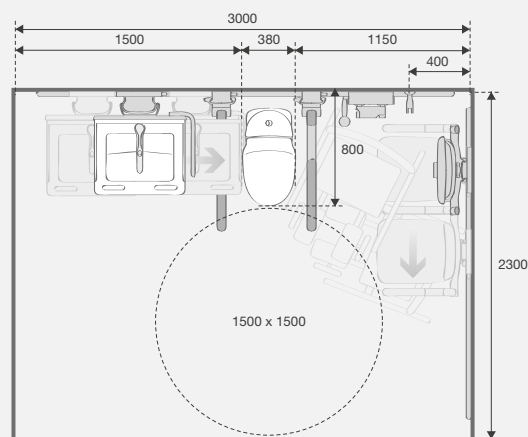

$3000 \times 2300 = 6,90 \text{ m}^2$
Den självständiga brukaren i fokus

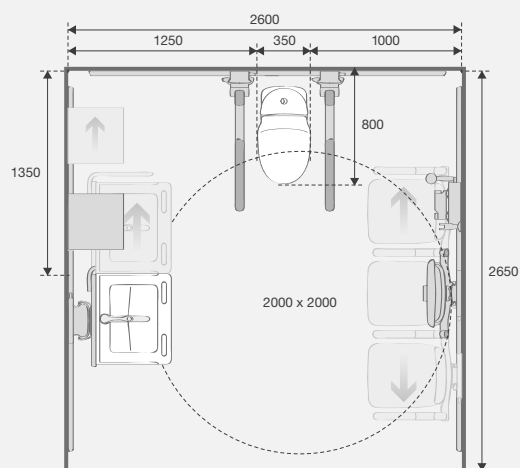

$2650 \times 2600 = 6,98 \text{ m}^2$
Badrum för vårdkrävande patienter. Arbetsyta: $d=2\ 000$ mm. Flyttbar förvaringsmöbel. Flyttbar duschsits eller mobil duschstol.

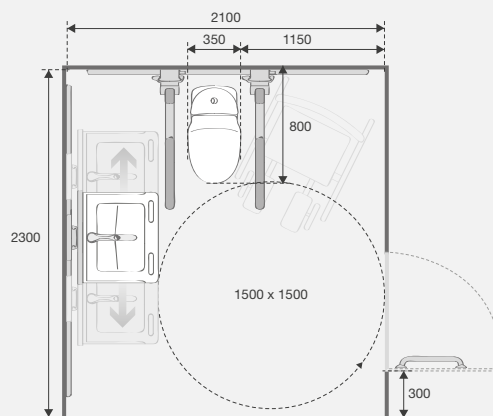

$2300 \times 2100 = 4,81 \text{ m}^2$
Handikapptoilet i offentligt tillgänglig byggnad.

Observera! Badrummet ska planeras i relation till bostadens/byggnadens övriga rum. Det är också viktigt att färger, ljus, värme, ventilation, golvbeläggning mm väljs med hänsyn till rummets dagliga användare. Se även checklistor på sida 6-7.



Det flexibla badrummet



Det flexibla PLUS-systemet skapar frihet för planering av ett badrum så att det anpassas precis till det aktuella behovet. Med skenan som grundelement kan inredningen när som helst anpassas och byggas om vid ändrade behov.



PRESSALIT®

Funktionsnedsättning behöver inte begränsa en människas liv. Keep living-filosofin har i över 35 år styrt Pressalits utveckling av flexibla lösningar för kök och badrum för människor med funktionsnedsättning.

Pressalit är med sin forskningsbaserade kunskap ledande inom speciallösningar för kök och badrum och är idag rådgivare för kunder över hela världen.

Den grundläggande respekten för den enskilda människan och dess möjligheter avspeglar sig också i förhållande till det samhälle och den omgivning samt verksamheten den är en del av. Hos Pressalit är Corporate Social Responsibility (CSR) djupt förankrat i verksamhetens strategi och värderingar och utgör ett viktigt riktmärke för alla delar i organisationen.

Pressalit har huvudkontor i Danmark.

www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry
Danmark
T: +45 8788 8788
F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com

Pressalit AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 Kista
Sverige
T: +46 8444 1930
se@pressalit.com

PRESSALIT SUPPORTS UNITED NATIONS GLOBAL AND UNICEF

