


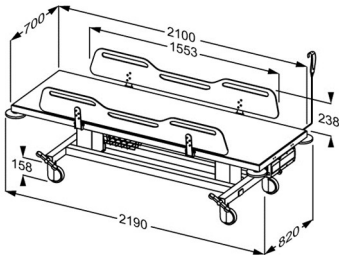

| | |
|-------------------------------------|---|
| Product Varunummer | MCT 2 mobil vårdbrits, elektriskt höjdglerbar R9432721000 |
| Färg | Vit |
| Beskrivning | <p>VVS: 777542220 EAN: 5708590373218 HMI: 128432</p>  <p>Pressalit erbjuder ett brett sortiment av mobila, flexibla, höjdglerbara och fast monterad dusch- och vårdbritsar av hög kvalitet. De är designade för att kunna erbjuda ett stabilt stöd vid tvätt, påklädning och vård av vuxna och barn.</p> <p>Britsarna kan användas på sjukhus, vårdhem, institutioner i skolor och i privata hem, de har alla hållbart material och hygieniska ytor som är både bekväma och mycket enkla att rengöra.</p> <p>Design och flexibilitet ger optimala arbetsvillkor för vårdgivaren såväl som en hög komfort- och säkerhetsnivå för brukaren.</p> <p>MCT 2 mobilt vårdbrits, 820 x 2190 mm, två nedfällbara sidor. Elektrisk höjdglerbar (batteridrivna) med manöverdosa. 400 mm höjdglering från 550 till 950 mm. Utrustad med centralt bromssystem, trådkorg för förvaring, hörnskydd i alla fyra hörnen, batteri och laddare. Lyftpelare och manöverdosa är IPX6, batteri och laddare är IPX5. Madrass måste beställas separat.</p> |
| Justerbar | Höjdglerbar |
| Höjdglering | 400 mm |
| Produktkapacitet | Max brukarvikt. 200 kg Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör) |
| Hastighet | Hastighet upp: 19 mm/s Hastighet ner: 19 mm/s |



| | |
|------------------------------|---|
| Product | MCT 2 mobil vårdbrits, elektriskt höjdglerbar |
| Varunummer | R9432721000 |
| Ergonomi | <ul style="list-style-type: none">• De ergonomiskt utformade sänggrindarna har en praktisk sänkt mittdel, vilket ger bättre åtkomst och arbetsmiljö för vårdgivaren vid förflyttning och av -och påklädning av brukare.• Enhandsgreppet för hantering av sänggrindarna gör det möjligt för vårdgivaren att hålla ögonkontakt och fysisk kontakt med brukaren under hela processen. De nedfällbara sänggrindarna ger också enkel åtkomst från alla fyra sidor av duschvårdbritsen.• De utskurna handtagen i sänggrindarna gör det möjligt för brukaren att själv hjälpa till när den ska vändas, vilket motiverar fysisk träning.• En förvaringskorg undertill gör det möjligt för vårdgivaren att förvara toalettartiklar och dylikt som behövs tillhands vid vårdtillfället.• Lätt att rengöra, med släta kontaktytor som inte samlar smuts och bakterier. |
| Funktioner | <ul style="list-style-type: none">• Den mobila dusch/vård britsen kan enkelt flyttas från rum till rum och används av flera användare. Två lyftpelare används för att skapa en estetiskt tilltalande, hygieniskt optimerad samt fysiskt och visuellt stabil konstruktion.• Enkelt handhavande ger användarvänlighet, har nedfällbara sänggrindar och trådbunden manöverdosa.• Säkerhetsbromsarna gör det möjligt för vårdgivaren att låsa alla fyra länkhjulen samtidigt genom att trampa på fotbromsen, vilket säkerställer bättre säkerhet och enkel användning i valfri position.• Alla lås- och frigöringsaktuatorer aktiveras genom att trappa ner dem uppifrån för att säkerställa ergonomisk interaktion och för att förhindra fot- och tåskador. Halkfri yta och mönster på alla fyra fotbromsarna förhindrar att foten glider, även under våta förhållanden.• Ett roterande hörnskydd i varje hörn av dusch/vård britsen skyddar de omgivande väggarna, dörrkarmarna och själva produkten om den kommer i kontakt med något under transporten.• Elektrisk höjjustering med batteri och laddare. Den väggmonterade laddaren för batteriet kan monteras i alla rum inkl. även utanför badrummet om så önskas. När batteriet börjar ta slut hörs ett pip varje gång manöverdosan aktiveras.• Batteriets laddningstid är ca. 3-4 timmar. |
| Anslutnings ström (V) | 230 |



PRESSALIT®

| | |
|--|--|
| Product Varunummer | MCT 2 mobil vårdbräns, elektriskt höjdglerbar R9432721000 |
| Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning) | BL1 (Linak) IPX6 COBO / CU20 (Linak) IPX6 HB30 (Linak) IPX6 Strömförbrukning vid maximal belastning: 100 W |
| Garanti Rengöring Överensstämmelses deklARATION | <p>Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. OBS Om produkten placeras i en miljö där det finns mycket salt eller klorid minskar garantitiden från 3 år (standard) till 1 år. Salt och klorid har en korrosiv effekt på komponenterna i produkten och gör att livslängden minskar.</p> <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggnigen kan uppstå.</p> <p>Denne produkt är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av maskindirektivet 2006/42/EEG och av RoHS-direktivet 2011/65/EU.</p> |



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®