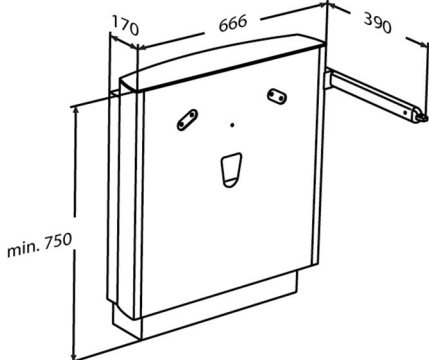




PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdreglerbar med manövreringsgrepp R4950000
Färg	VVS: 654005100 NRF: 6132541 EAN: 5708590324050 HMI: 82618 NBS: N13:30,335 Vit
Beskrivning	 SELECT upphängning till tvättställ, golvstående. Elektrisk höjdreglerbart 300 mm med manövreringsgrepp. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2065. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Rekommenderas med MATRIX SMALL och MATRIX CURVE/NEW CURVE tvättställ). Exkl. monteringskruv för vägg. SELECT upphängning till tvättställ, golvstående. Elektrisk höjdreglerbart 300 mm med manövreringsgrepp. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2065. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Rekommenderas med MATRIX SMALL och MATRIX CURVE/NEW CURVE tvättställ). Material: Anodiserad aluminium och polystyren (PS). Exkl. monteringskruv för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	300 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 150 kg. Lämplig för tvättställ 16-22 kg. När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 18 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 20 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 173 kg belastar tvättstället.



PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdreglerbar med manövreringsgrepp R4950000
Hastighet	Hastighet upp: 21 mm/s Hastighet ner: 21 mm/s
Ljudnivå	45 dB
Ergonomi Funktioner	Upphängningens skarpa och rena design med sina glatta ytor är både lätt att rengöra och snygg att se på i vardagen. Samtidigt bidrar det till en god hygien i badrummet. De exklusiva aluminiumprofilerna är både slitstarka, lätta och snygga att se på. Tvättstället höjs eller sänks med ett manövreringsgrepp på sidan av tvättstället. Manövreringsgreppet kan placeras på båda sidor av upphängning till tvättstället och fungerar samtidigt som handdukshängare. Manövreringsgreppet med den integrerade strömbrytaren för manövrering är stark nog att användas som extra stöd. Upphängning till tvättställ kan höjdregleras 300 mm – från 670 till 970 mm över golvet.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA31 Careline, (Linak), 1500N, IPX4
Kontrollbox	CB9 Careline, (Linak), IPX6
Manöverdosa	HB7, (Linak) IP66
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 75 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

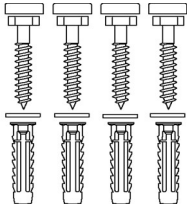
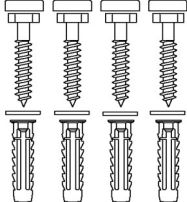
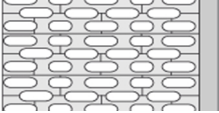
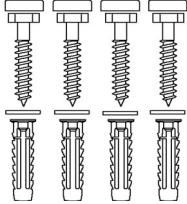
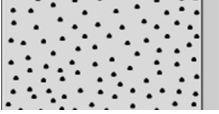
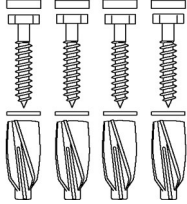
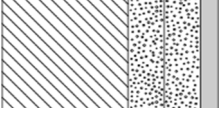
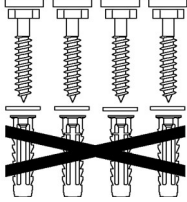
Product Varunummer	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjddreglerbar med manövreringsgrepp R4950000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Diese Produkt gemäß Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte, zuletzt geändert durch die Erfüllung der Richtlinie 2007/47/EG vom 5. September 2007, produziert worden ist. Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.



PRESSALIT®

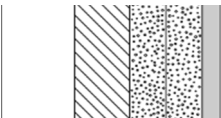
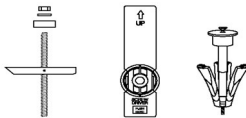
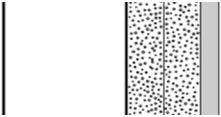
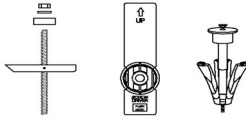
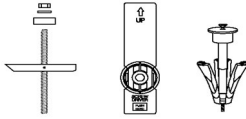
Product	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdglerbar med manövreringsgrepp
Varunummer	R4950000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdreglerbar med manövreringsgrepp R4950000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®