


EasyLift

Innovativ, enkel och säker
ett riktigt lyft

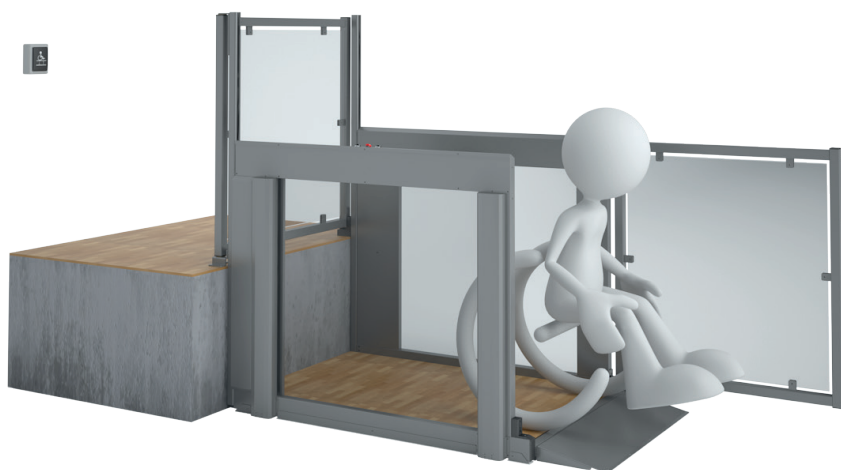




EasyLift

EasyLift är nyskapande i sin enkla design och förträffliga komfort. Med EasyLift kan den rullstolsburne eller rörelsehindrade enkelt och bekvämt förflytta sig mellan mindre nivåskillnader. Den maximala lyfthöjden är 1250 mm.

EasyLift har, till skillnad från den traditionella saxlyften, fyra ben som också fungerar som lyftpelare. Benen är placerade i hörnen och med den synkroniserade rörelsen av lyftpelarna erhålls alltid en säker och behaglig transport. EasyLift lyfter fortare och med en jämnare

hastighet än de traditionella saxlyftarna. EasyLift upplevs därför som mer stabil och bekväm än andra typer av lyftplattformar. EasyLift kan kombineras med grindar uppe och nere. Den automatiskt reglerade upp/nerkörningsrampen är uppfälld när lyftplattformen inte är i kontakt med golvet, om nedre grind inte installeras.

Rena linjer kännetecknar den stilfulla och eleganta designen. Olika tillvalsmöjligheter finns beträffande kulör och golvytans material i plattformspanelet.

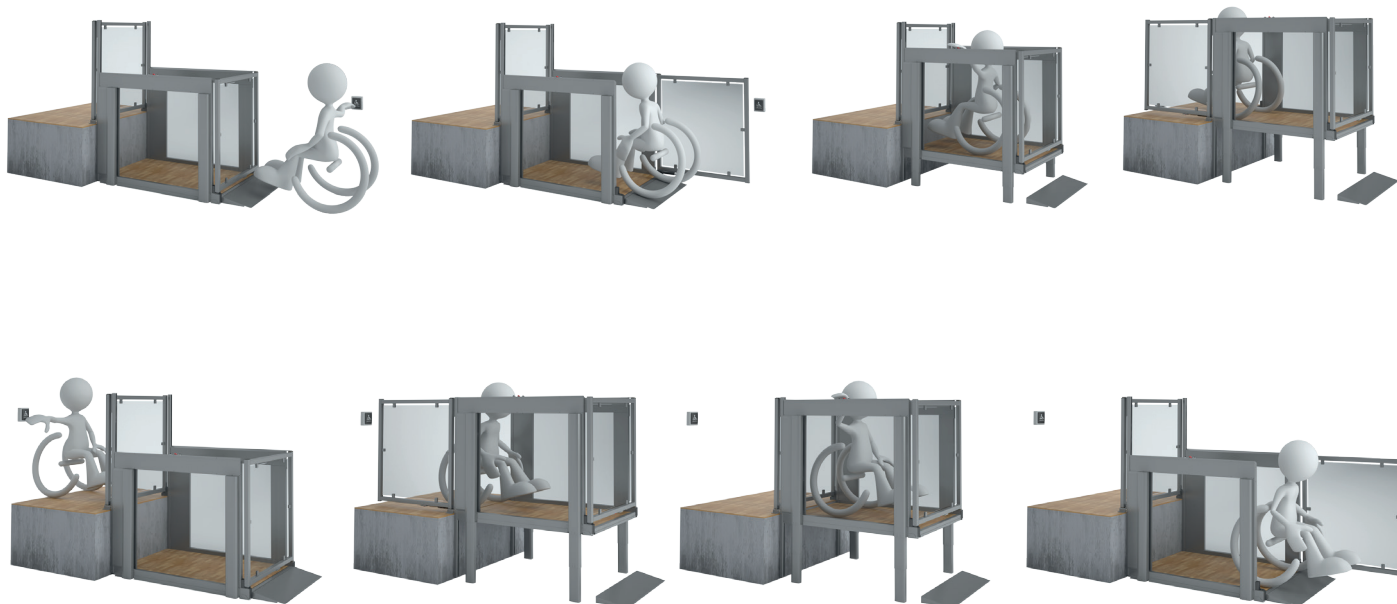

Specifikationer:

Storlek på plattform

800 x 1400 mm (för hemmiljö)

900 x 1400 mm (för offentlig miljö)

1100 x 1400 mm (för offentlig miljö)

Lyfthöjd

Max 1250 mm

Maxlast

Max 400 kg

Maximal drift:

2 min inom ett intervall av 5 min. Lyfthastigheten är upp till 40 mm/s.

Ström

230 V / 50 Hz / 10 A




Säkerhet:

EasyLift är säkerheten själv! Ett heltäckande klämskydd under plattformen garanterar att inget eller ingen kan komma i kläm eller till skada. EasyLift är framställd enligt gällande standard (2006/46/EG) och är CE-märkt.

Vid höjd över 500 mm skall det alltid vara grind uppe och nere. Vid höjd under 500 mm är den automatiskt reglerade upp/nedkörningsrampen uppfälld, när lyftplattformen inte har kontakt med med golvet, och fungerar då som ett avåkningsskydd.

EasyLift fungerar även vid strömavbrott.

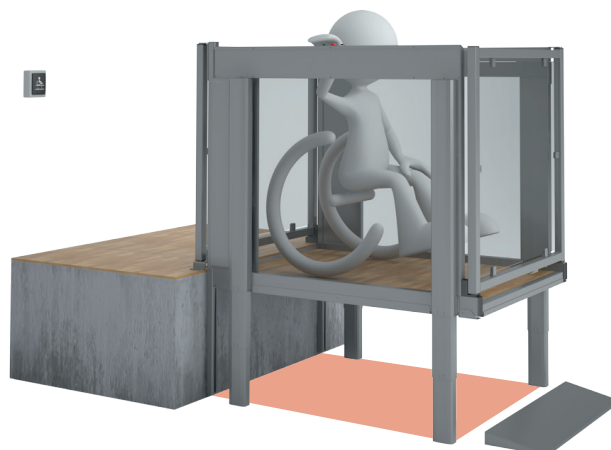


Vikt:

EasyLift väger mellan 95-120 kg.

Installation:

EasyLift ställs på ett plant golv och fästes i väggen. Trådlös manövrering via väggmonterade tryckknappar ingår som standard. Alternativ manövrering via kabeldragning, fjärrkontroll eller låsbar nyckelbrytare går att beställa.

Mer information finns på www.trident.se där det även finns en film om Easylift.

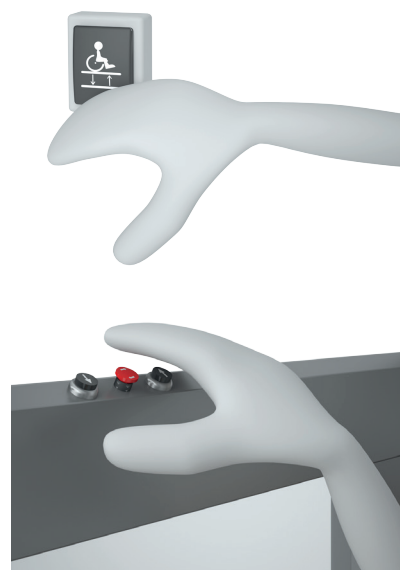



TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm
tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se